

Cómo realizar una prueba diagnóstica rápida de antígenos del SARS-CoV-2

Obtención de muestras, realización de la prueba e interpretación de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE COMENZAR

Preparación para la obtención de la muestra

- A. Hisopo nasofaríngeo estéril, envuelto de forma individual, nuevo (sin abrir)
- B. Equipo de protección personal: guantes, bata, protección ocular o careta protectora y mascarilla de protección respiratoria N95
- C. Bolígrafo o rotulador para etiquetar o




Obtención de muestras

Preparación para la realización de la prueba de antígenos del SARS-CoV-2

- A. Preparación para la realización de la prueba de antígenos del SARS-CoV-2
- B. Dispositivo de prueba de antígenos del SARS-CoV-2 nuevo (sin abrir)
- C. Cronómetro
- D. Tubo de tampón de extracción y boquilla
- E. Recipiente para desechos médicos
- F. Desinfectante (lejía y alcohol)




- 1** Introduzca un hisopo nasofaríngeo estéril en la fosa nasal del paciente, llegando a la superficie de la nasofaringe posterior

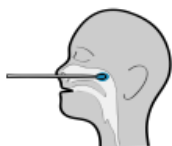

- 2** Frote sobre la superficie de la nasofaringe posterior, haciendo girar el hisopo 3 o 4 veces para asegurar la obtención de una buena muestra. Mantenga el hisopo en la fosa nasal durante unos pocos segundos; ello permitirá asegurar que se produzca la absorción de las secreciones nasales



- 3** Retire el hisopo estéril de la fosa nasal

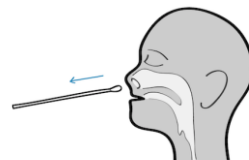


Realización de la prueba de antígenos del SARS-CoV-2

- 4** Introduzca el hisopo en un tubo de tampón de extracción. Revuelva el hisopo mientras presiona en el tubo de tampón



- 5** Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo para extraer el líquido del hisopo

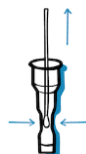

- 7** Aplique gotas de la muestra extraída en el recipiente para la muestra del dispositivo de análisis. Agregue el número exacto de gotas especificado por el fabricante



- 8** Después del plazo especificado, realice la lectura del resultado de la prueba y regístrelo. Informe el resultado de la prueba



- 6** Presione con fuerza la tapa de la boquilla sobre el tubo



- 9** Deseche los guantes, el dispositivo de prueba, el hisopo y el tubo de tampón de extracción en el recipiente para residuos médicos. Desinfecte el puesto de trabajo con lejía y alcohol



Interpretación del resultado de la prueba

Positivo

Una línea en "C" Y una línea en "T" significa que SE DETECTA el SARS-CoV-2.



Negativo

Una línea en "C" y NINGUNA LÍNEA en "T" significa que NO SE DETECTA el SARS-CoV-2.



No válido

NINGUNA LÍNEA en "C" y una línea o ninguna en "T" significa que la prueba NO ES VÁLIDA. Repita la prueba empleando un dispositivo nuevo (sin abrir) de prueba de antígenos del SARS-CoV-2 y una muestra nueva

