

Como realizar um teste de diagnóstico rápido de detecção do antígeno do SARS-CoV-2

Coleta da amostra, testagem e interpretação dos TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE ANTES DE COMEÇAR

Preparação para a coleta da amostra

- A. Swab nasofaríngeo estéril novo (não aberto) e embalado individualmente
- B. Equipamento de proteção individual - luvas, jaleco, óculos de proteção ou viseira, e máscara N95
- C. Canetas para marcar ou rotular




Preparação para o teste de detecção do antígeno do SARS-CoV-2

- A. Dispositivo de teste novo (não aberto) de detecção do antígeno do SARS-CoV-2
- B. Cronômetro
- C. Tubo de extração com solução-tampão e bocal
- D. Container para resíduos biológicos
- E. Desinfetante (hipoclorito de sódio e álcool)




Coleta de amostras


- 1** Insira o swab estéril na narina do paciente, chegando à superfície posterior da nasofaringe

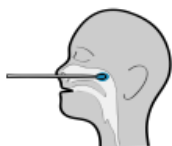

- 2** Esfregue a superfície posterior da nasofaringe, rodando o swab 3 a 4 vezes para assegurar uma boa amostra. Deixar o swab na cavidade nasal por alguns segundos assegurará a absorção das secreções nasais

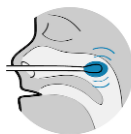

- 3** Retire o swab da cavidade nasal

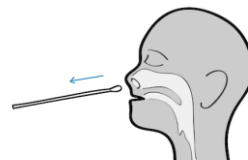


Teste de detecção do antígeno do SARS-CoV-2

- 4** Insira o swab no tubo de extração com solução-tampão. Agite o swab enquanto aperta o tubo



- 5** Remova o swab enquanto aperta ambos os lados do tubo para extrair o excesso de líquido do swab

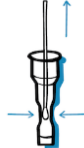

- 6** Pressione a tampa para fechar bem o tubo



- 7** Aplique as gotas da amostra extraída na cavidade para as amostras do dispositivo de teste. Adicione o número exato de gotas especificado pelo fabricante



- 8** Leia e registre o resultado do teste após o período de tempo especificado. Comunique o resultado do teste



- 9** Elimine as luvas, o dispositivo de teste, swab e o tubo de extração no coletor de resíduos biológicos. Desinfete a área de trabalho com solução de hipoclorito de sódio e álcool



Interpretação prática do resultado do teste

Positivo

Uma linha no «C» E uma linha no «T» significa que FOI DETECTADO SARS-CoV-2



Negativo

Uma linha no «C» e NENHUMA LINHA no «T» significa que NÃO FOI DETECTADO SARS-CoV-2



Inválido

NENHUMA LINHA no «C» e uma linha ou nenhuma linha no «T» significa que o teste é INVÁLIDO. Repita o teste usando um novo dispositivo de teste de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 e uma nova amostra

